

2021年12月

医療関係者各位

ノボキュア株式会社

オプチューン®のアラーム音変更に関してのご連絡

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は弊社オプチューン®(NovoTTF-100A システム)をご処方いただき、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、下記の通りご連絡致します。ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

本体アラーム音の変更に関して

2022年1月の新規患者様から、本体のアラーム音が変更されます。それに伴い、現在ご使用中の患者様に関しては、混乱が生じない様、調整しつつ本体の変更を進めてまいります。ご了承の程、よろしくお願い致します。

表示とアラームの鳴り方	原因	アラームの止め方	対処方法	治療の開始
 [ERROR]点滅 1秒に1回	 [TTFIELDS] 点滅	 アラーム音 短い音が3回	TTFIELD ボタンの 押し忘れ	
 [ERROR]点滅 2秒ごと	 [TTFIELDS] 消灯	 アラーム音 長い音が3回	接続不良	 それぞれのコネクターがしっかり差し込まれているか確認する
 [ERROR]点滅 1秒に2回	 [TTFIELDS] 消灯	 アラーム音 短い音が3回+2回	アレイの過熱 (最高温度超え)	 【温度を下げる方法】 ・涼しい場所に移動する ・アレイを約5～10分冷やす ・アレイと頭皮が密着しているかを 確認して、アレイを手で押さえ、 必要に応じてネットでおおおう ・必要に応じて新しいアレイと交換する
 [ERROR]点滅 2秒ごと	 [TTFIELDS] 消灯	 アラーム音 短い音が3回	その他の アラーム	 充電済みのバッテリーに交換してください。アラームが鳴りやまない場合、または故障している場合はデバイス・サポート・スペシャリスト (DSS) もしくは、お問い合わせ窓口にお尋ねください。

以上