

当社製品ご使用者様
治療協力者の皆さま

ノボキア株式会社

高温多湿の時期における「NovoTTF-100A システム（オプチューン®）」 のバッテリー・バッテリー充電器の取り扱いについて

梅雨や夏場など、気温と湿度が高くなる時期には、オプチューンのバッテリー・バッテリー充電器に関して以下のような事象が発生しやすくなります。当社製品ご使用者様及び治療協力者の皆さまにおかれましては、添付文書、取扱説明書の記載に基づき、以下についてご留意いただきたくご案内申し上げます。オプチューンのバッテリーにはリチウムイオン二次電池を使用しているため、直射日光、高温多湿を避けて使用してください。**特に、直射日光のあたる窓際や車内、浴室の周辺などに放置することは避けてください。**

【高温多湿環境下において起こりえるバッテリー・バッテリー充電器の事象】

- バッテリー自体が熱くなります。
- バッテリーの性能が低下して、いつもより充電に時間がかかったり、バッテリーの使用時間が短くなったりします。
- バッテリー充電器が過熱し、バッテリーの充電ができなくなることがあります。

【事象発生時の対処方法】

- バッテリーが通常より高温になっていると感じられる場合は、涼しい場所に5分程度静置してから充電を開始して下さい。
- 充電済みの新しいバッテリーと交換してください。
- バッテリー充電器の通気口が塞がれていないかを確認してください。

【予防策】

- バッテリー充電器は高温多湿を避け、通気性のよい場所に設置してください。
- バッテリー・バッテリー充電器は、直射日光のあたる窓際や車内、浴室の周辺などに放置しないでください。
- バッテリー充電器の側面（左／右）にある換気口は絶対にふさがないようにください。また、換気口の周囲には物を置かず、近くの家具や壁から離して設置してください。

【その他の注意事項】

- 取扱説明書に従って使用してください。
- バッテリー・バッテリー充電器に水をかけたり、急激に冷やしたりしないでください。

その他、製品の取り扱いに関するお問い合わせは下記ノボキア株式会社お問い合わせ窓口へご連絡いただきますようお願い申し上げます。

ノボキア株式会社 お問い合わせ窓口

機器アラーム対処法、その他機器に関すること

平日 9:00-17:30 TEL 050-3149-1020

夜間 17:30-翌 9:00/土日・祝日 TEL 03-4500-7515